

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 手動式生体用洗浄器 34630000

アソノール

【禁忌・禁止】

- ・鼻の炎症(鼻づまり等)のひどい時、耳に疾患のある時は医師に相談のうえ使用してください。
- ・使用中や使用後に異常を感じた時は使用を中止し、医師に相談してください。
- ・お子様が使用する際は保護者の指導の下で使用してください。

【使用方法等】

1. 本製品は就寝前の使用をお勧めします。
2. 頭を後ろに傾け、ノズル先端を軽く鼻腔に入れます。
3. 洗浄液がのどに到達するのを感じるまで、各鼻腔に4~6回スプレーします。
洗浄液がのど粘膜にとどまり、コーティングすることで、粘膜をやわらげます。乾燥を防ぎ、呼吸気流の流れをスムーズにします。
4. 使用後はノズルを清潔にして、保護キャップをはめて保管します。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状、構造



【使用上の注意】

1. 鼻腔以外には使用しないでください。
2. ノズルを鼻の奥まで入れないでください。
3. 感染症予防のため、本人以外は使用しないでください。
4. 洗浄液が無くなったら、本品は破棄してください。
5. 子供の手の届かないところに保管してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
2. 使用開始後は3か月以内に使い切ってください。

【保守・点検に係る事項】

使用後はノズルを除菌製剤(消毒用アルコール等)でふき取り、保護キャップをはめて清潔に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の名称等】

製造販売業者: コビュー・ジャパン株式会社
www.covue.com

製造業者: レシファーム パレッツ S.L.U. スペイン
Ramon y Cajal 2, 08150 Parets del Valles
(Barcelona)

2. 原材料

- ・ 材質
保護キャップ : ポリエチレン
ノズル、スプレー : ポリエチレン
ボトル : ポリエチレン
- ・ 洗浄液(30ml)成分
精製水・塩化ナトリウム・グリセリン・ポリソベート80・
ソルビン酸カリウム・エデト酸二ナトリウム

3. 原理

スプレー(ポンプ)を下に押すことにより1回約0.12mlの洗浄液がノズル先端から噴出される。

【使用目的又は効果】

本品は鼻腔洗浄と同時に、鼻腔粘膜、のど粘膜に潤いを与え、やわらげます。